

# Dispositivo vibratorio de PEP acapella® Choice Blue

## Ficha técnica

### Descripción del producto

El dispositivo vibratorio de PEP acapella® Choice Blue es un dispositivo de uso en un solo paciente que administra tratamiento de presión espiratoria positiva (PEP) a pacientes con fibrosis quística, EPOC, asma y neumopatías con problemas de secreción, así como a pacientes con atelectasia. Todos los pacientes deben ser capaces de seguir las instrucciones del tratamiento de presión espiratoria positiva.

### Indicaciones

El acapella® Choice Blue está diseñado para utilizarse como dispositivo de presión espiratoria positiva (PEP). También puede emplearse simultáneamente con la administración de fármacos en aerosol nebulizado.

### Precauciones

- No se recomienda utilizar lejía en el acapella® Choice Blue. Podría deteriorar el mecanismo niquelado que se encuentra en el interior del dispositivo.
- **NO INTRODUCIR EN MICROONDAS.**
- Inspeccione visualmente el dispositivo para asegurarse de que está libre de contaminación y objetos extraños.
- Compruebe que todas las conexiones estén aseguradas.

### Vida útil del producto

Tras el uso inicial, el funcionamiento previsto del producto es de seis (6) meses antes de sustituirlo.

### Componentes del producto

El dispositivo vibratorio de PEP acapella® Choice Blue con válvula inspiratoria unidireccional y acoplamientos macho de 22 mm consta de: (1) Boquilla extraíble (el extremo del dispositivo se adapta a la máscara), (2) Cuerpo con selector de ajuste de la resistencia/frecuencia espiratoria, (3) Cubierta extraíble, (4) Unidad de balancín extraíble – NO desmonte el brazo del balancín de su plataforma base.



### Composición de los componentes

Este producto no está hecho de látex de goma natural y no incorpora tejido animal ni sus derivados.

**Boquilla**  
Policarbonato

**Cuerpo**  
Policarbonato Samario-cobalto

**Cubierta**  
Policarbonato

**Unidad de balancín**  
Policarbonato  
Polipropileno reforzado con fibra de vidrio Revestido de níquel - acero inoxidable.

### Nombre y dirección del fabricante legal

Smiths Medical ASD, Inc.  
6000 Nathan Lane North  
Minneapolis, MN 55442, EE. UU.

### País de origen

EE. UU.

### Método de esterilización

Producto no estéril

### Vida útil

2 años

## Etiquetado y envasado

Dispositivo vibratorio de PEP acapella® Choice Blue					
Código de producto	Sistema de envasado	Altura (mm)	Anchura (mm)	Profundidad (mm)	Peso (g)
27-8000	Bolsa plástica para cada unidad	279,4	177,8	N/C	174,5
	Paquete de almacenaje	261,9	208,0	144,5	2045,0

Cada unidad (1) de producto viene embalada en una bolsa plástica o una caja. La etiqueta de la bolsa plástica/caja lleva impresa la información específica para facilitar la identificación del producto.

En cada paquete de almacenaje vienen embaladas diez (10) unidades. El número de lote, la fecha de fabricación y la fecha de caducidad se indican en las etiquetas de la bolsa y del paquete de almacenaje.

## Gama de productos y características

Dispositivo vibratorio de PEP acapella® Choice Blue		
Código de producto	Descripción	Unidades por paquete
27-8000	Sistema de terapia vibratoria de PEP acapella® Choice Blue con boquilla	10